

診療ユニットの背面キャビネット



左から
手洗い 自動水栓 ペーパータオル

上段の棚
基本診査セット収納 最下段はタービンなどを収納
紙エプロン バリアフィルム ライトハンドルカバー マスク
グローブ (各種サイズ)



ワッテ缶などは以前はユニットのトレーテーブルに置いていたが、4月からは、背面キャビネットに移動した。

鉗子立てにある取り出しピンセットは基本セットで、毎回交換する。



ヘッドライトは、タッチセンサー
ライトハンドルには、カバー（日本
ヘルスケア歯科学会）

左から、取り出し用ピンセット、
歯科用ピンセット、探針、ミラー、バ
キュームチップ、スリーウエーチップ、基本セット収納用カセット

トレイ：中央化学トレイ C-92 約13円

収納用カセット：Nichrominox(フランス) ディスインフェクター用カセット

<https://www.nichrominox.fr/flat-cassettes.htm>

GALAXY FLAT CASSETE 18x6 51ユー口

基本セットは40セット用意してある。



バキュームにはスリーブ、排唾バ
キューム使用時にもスリーブをつける



スリーウエーシリンジのノズル
は毎回外して滅菌、シリンジは
スリーブでカバーをする

汚染されている手で操作：レッドゾーン

汚染されていない手で操作：ホワイトゾーン

注意！アシスタントのグローブは、バキュームを持つためレッドゾーン



操作パネルとグリップにはバリアフィルムを貼り、患者さんごとに交換。剥がしやすいように、貼るのが大事。マウスはホワイトゾーン。



ヘッドレストの操作は、バリアフィルムを貼ることができないので、ホワイトゾーンとしている。

治療中に修正する場合は、一旦グローブを取るか、オーバーグローブ。



照射器は、ライトハンドルカバー（日本ヘルスケア歯科学会）を使用

入手できない場合は、ラップを巻き付けたり、セロテープで固定してもよい。



コードレスエンジンは、バリアフィルムを使用、ヘッドは、オートクレーブ滅菌。ラバーカップ、ブラシは、ディスポ。



洗浄・滅菌コーナー 専任スタッフ1名



左から

1 使用済み器具置き場 下段はゴミ収納

2 超音波洗浄機 下段は医療廃棄物

3 洗浄シンク

4 器具洗浄機 (タカラ 速洗)

<https://www.takara-dental.jp/products/disinfection/miele/index.html>

5 ヒートシーラー Euroseal

<https://prosystem.euronda.com/product/euroseal-valida/>

6 STATIM 5000 G4

<https://www.sedent.co.jp/professionals/view/>

[67/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A0_G4_%E3%80%80%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA](https://www.sedent.co.jp/professionals/view/67/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A0_G4_%E3%80%80%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA)

7 オートクレーブ スーパークレーブHF260 2台

http://hillson-dec.jp/product/product_03.html#01

8 KAVO ステイテム 900J

https://www.kavo.co.jp/product/kavoproduct/hand_piece/maintenance/sterilization

9 ホルムアルデヒド消毒器 ホルホープデンタル

<https://do.dental-plaza.com/search/item/detail/id/6600000/>



外科器具、スケーラー（カセット）、タービンバー（カセット）などは、タンパク質除去液に浸漬後、速洗で温水洗浄してオートクレーブへ。基本セットは、速洗で洗浄後、オートクレーブへ。



STATIM5000は、基本セットが10セット入る（上下2段）ただし、蒸留水を沢山使用する（精製水は不可）ので、コストがかかる。



KAVOステイテムは、回転切削器具、バーの滅菌に使用している